

ANLEITUNG ZUM FLOWFLEX-SELBSTTEST

EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN



EINWEGTUPFER



TESTKASSETTE

POSITIV?

DIE SCHULLEITUNG INFORMIERT 1450 ODER
DIE ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

NEGATIV?

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

1




- Schnäuzen vor dem Test
- Halterung zusammenbauen
- Röhrchen mit Pufferlösung aufschrauben und in die Halterung stellen, ohne es zu drücken
- Stäbchenverpackung mit einer Schere aufschneiden

2




- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

3

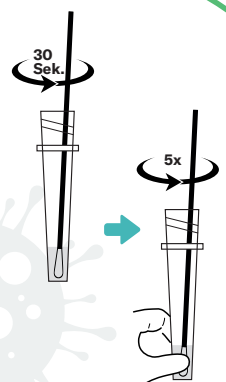

- Röhrchen mit Pufferlösung aus der Halterung nehmen
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Röhrchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrchen spritzt!

4

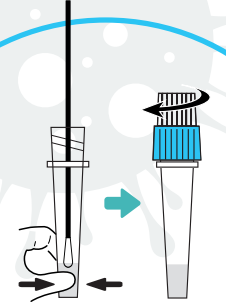


- Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken
- Gebrauchtes Stäbchen wieder in die Verpackung schieben
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Röhrchen wirbeln und schütteln

5



- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Röhrchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)


6



- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

7

Ergebnisinterpretation

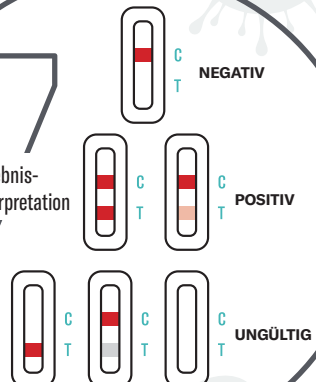

- NEGATIV (C, T)
- POSITIV (C, T)
- UNGÜLTIG (C, T)