


التحليل الذاتي-للمستدض للطلاب والطالبات

قم بتدويرها داخل أنفك بعمق 2 سانتيمتر فقط!
بسرعة ومن دون ألم! وتحصل على النتيجة بعد 15 دقيقة!



بطاقة التحليل

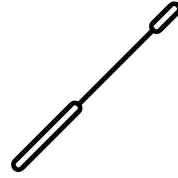


نكّاش عليه قطنة




سائل التحليل


ما الذي تحتاجه للقيام بذلك؟

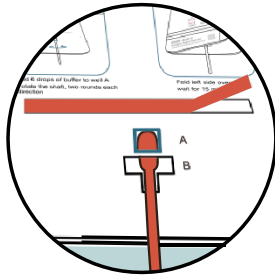


الخطوة 2:
• قم بزالة الفلاف الواقي
لدى الشريط اللاصق
وأدخل العيّنة في الفتحة

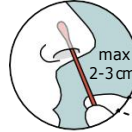

الخطوة 1:
• أدخل القطنة 2 سانتيمتر فقط في
تجويف الأنف
• قم بتدوير القطنة خمس مرّات
• انتقل الى المنخر الثاني، قم بإعادة
التدوير

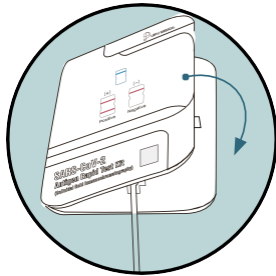

الخطوة 4:
• قم ب لصق الجهة اليسرى باليمينى
• ستظهر نتيجة التحليل بعد 15
دقيقة

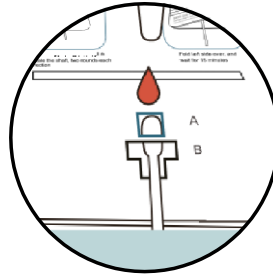

الخطوة 3:
• أضف 6 قطرات من سائل
التحليل في التعميق ثم قم
بتدوير القطنة مرّتين في كل
اتجاه



الخطوة 5:
• إذا كانت النتيجة إيجابية:
في المنزل: اتصل بـ 1450
في المدرسة: إدارة المدرسة سوف تبلغ 1450 أو الدائرة
الصحية الرسمية
• إذا كانت النتيجة سلبية:
ابقى معافى واستمر بدوامك في المدرسة